

TCS-MAX(SBF付) ベルトの交換方法



注意

- 作業をする前に、必ず医療用手袋を着用してください。
- ブレーカの電源をOFFにし、操作盤の電源ランプが消えたのを確認してください。
- サクションスイッチをONにしてモーターが回らないことを確認してください。

■ ベルト交換手順

① ベルトカバーを固定している4本のネジを外し、ベルトカバーを取ります。



② 使用済みのベルトをハサミでカットしてプーリーから外し、新しいベルトを取り付けます。
新しいベルトは、小さいプーリーにベルトを掛け、次に大きいプーリーに掛けます。



③ ①と逆の手順でベルトカバーを取付け、ネジを締めます。