

10ℓ分離器 清掃方法




注意

- 作業をする前に、必ず医療用手袋を着用してください。
- ブレーカの電源をOFFにし、ブロワが止まったのを確認してください。
- 操作盤またはブロワの電源ランプが消えているのを確認してください。
- 分離器及び本体内の水が排水されたことを確認してください。


■ 金網の清掃方法

継手を外して、金網を清掃します。

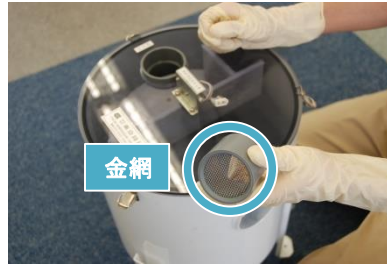


■ 本体内の清掃方法

- ① 継手、コネクタを外し、パッチン錠(3箇所)を外してから蓋を外します。
- ② 本体を水、または中性洗剤で清掃後、コネクタ、金網、継手を取り付けます。 ※洗剤は吸引させないでください。

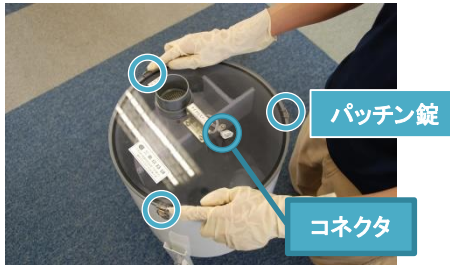

■ 排水弁の清掃方法

- ① 本体の底面から排水弁を外し、排水弁の継ぎ目を外して清掃します。

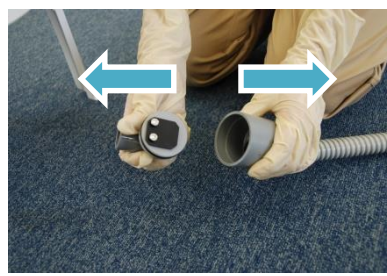

- ② 清掃後、外した継ぎ目を赤いラインに合わせて取付け、底面に取付けます。

