


実は簡単！


# フィルタ交換方法

単体移動型には、「チリ受けフィルタ」・「バッグフィルタ」・「スーパーバイオフィルタ」の3つのフィルタを搭載しています。それぞれのフィルタは、ご自身で簡単に交換することができます。

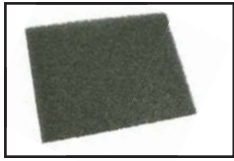

## ① チリ受けフィルタ

交換目安：1ヶ月に1回

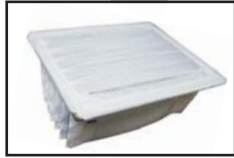


## ② バッグフィルタ

交換目安：6ヶ月に1回



## ③ スーパーバイオフィルタ

交換目安：3年に1回

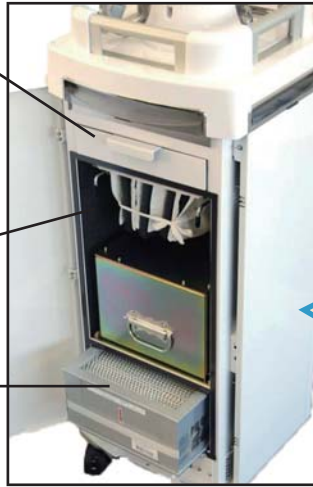

### フィルタ交換の際の注意事項

- ・電源スイッチ(ブレーカ)を「切」にする。
- ・電源プラグを電源コンセントから抜く。
- ・濡れた手で触らない。
- ・グローブを着用する。
- ・各フィルタは医療廃棄物として処分する。

### ① チリ受けフィルタの交換方法

1. カバーを開けます。



2. チリ受け引き出しを開け、チリ受けフィルタを交換してください。



### ② バッグフィルタの交換方法

1. 蓋板を手前に倒し上に持ち上げて外します。



2. 両端のレバーを矢印の方向に回します。



3. バッグフィルタを引き出し、交換してください。

奥の金具に当たるまで入れてください！




### ③ スーパーバイオフィルタの交換方法

1. 蓋板を前に倒し上に持ち上げて外します。



2. 固定レバーを矢印の方向に倒します。

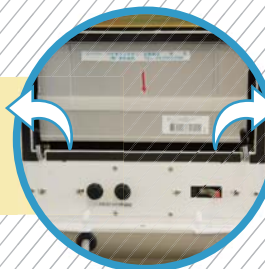

3. スーパーバイオフィルタを引き出し、交換してください。

向きに注意！  
(バンドが付いている方が手前です)



# フィルタ交換 手順書

TCS-Dual Plus-F 編



TCS-Dual Plus-F

## 搭載フィルタ

TCS-Dual Plus-F用  
スーパーバイオフィルタ



B138 / 04560200857614  
定価:120,000円(税別)

交換目安: **3年に1度**

TCS-Dual Plus-F用  
プレフィルタ



B137 / 04560200857607  
定価: 22,000円(税別)

交換目安: **半年~1年に1度**

## 必要なもの

- ・グローブ
- ・マイナスドライバー

### ! 注意 !

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

正面のカバーを手前に倒し、  
上に持ち上げて外す。



2

正面の2つのボルトを矢印の方向(左)に  
回して緩め、蓋板を手前に倒す。  
(固い場合はマイナスドライバーなどで回す。)



3

サイドの2つの蝶ねじナットを  
矢印の方向(左)  
に回し、ストッパーを内側に倒す。



4

上段のスーパーバイオフィルタを引き出し、  
新しいフィルタと交換する

**※フィルタの向きに注意!**

赤い矢印が書いてある面が手前です。



5

下段のデュアルプラスフィルタを  
つまみを持って引き出し、  
新しいフィルタと交換する。



6

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。

# フィルタ交換 手順書

TCV-FAC-21S 編



TCV-FAC-21S

## 搭載フィルタ



スーパーバイオフィルタ21  
B028 / 04560200856129  
定価: 240,000円(税別)

交換目安: **3年に1度**

## 必要なもの

- ・グローブ
- ・マイナスドライバー

### ⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

正面の2つのボルトを矢印の方向(左)に回して緩め、蓋板を手前に倒す。(固い場合はマイナスドライバーなどで回す。)



2

フィルタはストッパーで固定されているので、帳ねじナットを矢印の方向(左)に回して外す。



3

ストッパーを上を持ち上げながらフィルタを引き出し、新しいフィルタと交換する。

※フィルタの向きに注意!  
赤い矢印が書いてある面が手前です。



4

逆の手順でストッパー、カバー等を元に戻す。




# フィルタ交換 手順書

TCS-Dual Plus-A 編



TCS-Dual Plus-A

## 搭載フィルタ

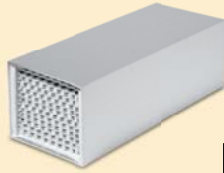

スーパーバイオフィルタSS  
B057 / 04560200857218  
定価: 60,000円(税別)

交換目安: 3年に1度

## 必要なもの

- ・グローブ
- ・プラスドライバー  
(スタービードライバー)



### ⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

プラスドライバー  
(またはスタービードライバー)で  
両サイドのボルトを外す。




2

カバーを手前に倒し、  
上に持ち上げて外す。



3

ホースが接続されている蓋板のボルトを  
プラスドライバーで外し、  
ホースごと蓋板を外す。

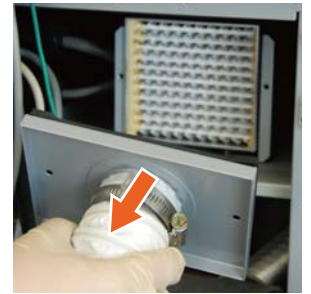

4

フィルタを上を持ち上げて引き出し、  
新しいフィルタと交換する。  
(固い場合はドライバーなどをご使用ください。)

※フィルタの向きに注意!  
赤い矢印が書いてある面が手前です。



5

逆の手順で  
ホース、カバー等を元に戻す。



# フィルタ交換 手順書

TCV-CS1000 編



TCV-CS1000

## 搭載フィルタ



スーパーバイオフィルタSS  
B057 / 04560200857218  
定価: 60,000円(税別)

交換目安: **3年に1度**

## 必要なもの

- ・グローブ
- ・(マイナスドライバー)

### ⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

正面のボルトを矢印の方向  
(左)に回して外し、  
カバーを手前に倒す。  
(固い場合はマイナスドライバーなどで回す)



カバーがボルトで  
留められているタイプ



正面のパッチン錠(2箇所)を外し、  
カバーを手前に倒す。




カバーがパッチン錠で  
留められているタイプ



2

フィルタはストッパーで固定されているので、  
蝶ねじナットを手前に回して緩め、  
ストッパーを外す。

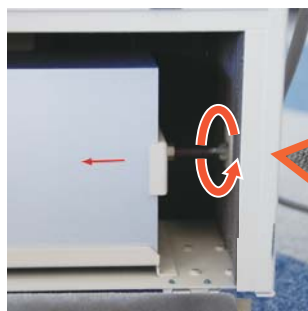

取り出した  
ストッパー

3

フィルタを持ち上げてから手前に引き出し、  
新しいフィルタと交換する。

※フィルタの向きに注意!  
赤い矢印が書いてある面が手前です。



4

逆の手順でストッパー、カバー等を元に戻す。

# フィルタ交換手順書

TCC-Dual Plus-C2  
/CB2/CW2 編



TCC-Dual Plus-C2/CB2/CW2

## 搭載フィルタ



エアフィルタ  
C927 /04562199985811  
定価: 7,000円(税別)

交換目安: 3年に1度

## 必要なもの

- ・グローブ
- ・プラスドライバー  
(スタービードライバー)



## ⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

1

プラスドライバー  
(またはスタービードライバー)で  
両サイドのボルトを外す。



2

カバーを手前に倒し、  
上に持ち上げて外す。




3

フィルタが収納されている蓋板のボルトを  
矢印の方向(左)に回して外し、  
蓋板を手前に倒す。




4

蝶ねじナットを手前に回して外し、  
フィルタのカバーを引き出す。  
※蝶ねじナットを内部に  
落とさないように注意してください。

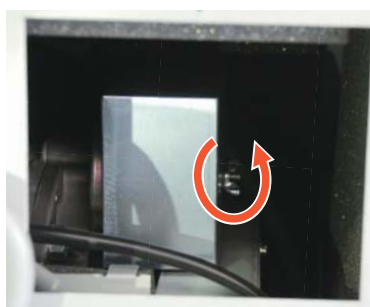

5

フィルタを取り外し、  
新しいフィルタと交換する。

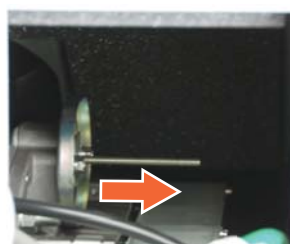

6

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。

# フィルタ交換 手順書

TCC-1.5R/2.2R 編



TCC-1.5R/2.2R

## 搭載フィルタ



エアフィルタR  
C932 / 04562199985866  
定価: 2個 15,000円(税別)



クランクフィルタ  
C933 / 04562199985873  
定価: 5,000円(税別)

各交換目安: **3年に1度**

## 必要なもの

- ・グローブ

### ⚠ 注意 ⚠

- ・電源を『切』にしてから作業すること。
- ・濡れた手では触らないこと。
- ・グローブを着用すること。

## エアフィルタR 交換手順

1

カバーのパッチン錠を外す。  
(各3箇所)



2

蝶ねじナットを矢印の方向(左)に回し、フィルタを取り外す。  
新しいフィルタと交換する。



3

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。

## クランクフィルタ 交換手順

1

蝶ねじナットを矢印の方向(左)に回し、カバーを外す。



2

フィルタを取り外し、  
新しいフィルタと交換する。



3

逆の手順でボルト、カバーなどを元に戻す。