



どうしてエンベロープウイルスにも効果があるの？

パワーミスト2の主成分は、エタノール(アルコール)。
 コロナウイルスを含むエンベロープウイルスは、
 その名の通りエンベロープ(膜状の構造)があります。
 エタノールはエンベロープを壊し、ウイルスに直接
 ダメージを与えることが出来る為、パワーミスト2は
 エンベロープウイルスにも有効であると言えます。

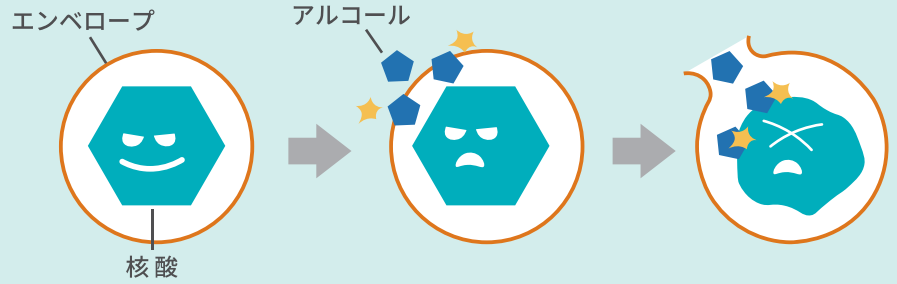


パワーミスト2の使いかた

■ フリーアームに吸引させて除菌

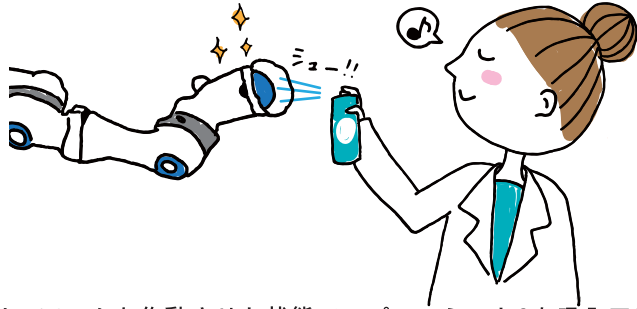


フリーアームを作動させた状態で、パワーミスト2を吸入口に
 向けて1回分(約2秒間)を噴射させます。吸入後はフリーアームを
 そのまま5分ほど空運転させてください。
 (※洗浄後、水等ですすぐ必要はありません。)

■ 内部の汚れが目立つ場合

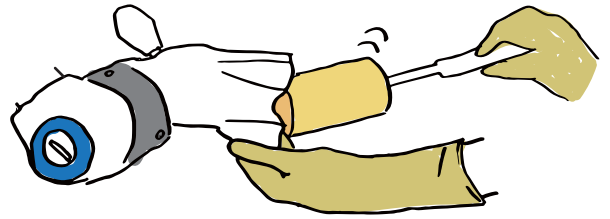


内部の汚れが目立つ場合は、掃除用キットの専用スポンジ
 ブラシで軽く拭き取ってください。
 (※誤吸引の恐れがありますので、必ず本体の電源を切った
 状態でご使用ください。)

■ フリーアーム本体の除菌・お掃除に

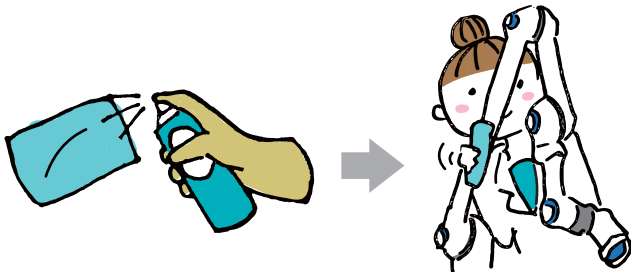

本体をお手入れする際は、柔らかい布等にパワーミスト2を
 少量含ませて、軽く拭き取ってください。

■ 診療室内のテーブル等の除菌・お掃除に

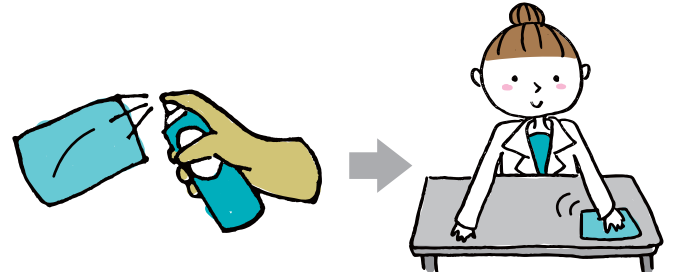

ふきん等にパワーミスト2を少量含ませて、拭き掃除を
 行ってください。

便利なお掃除キット



- **アルテオ 掃除用キット**
 パワーミスト2、スポンジブラシのセット。
 B459 / 04560200857911
- **フォルテ 掃除用キット**
 パワーミスト2、ドライパー、
 スポンジブラシの3点セット。
 B380 / 04560200857447

使用に際しての注意

- 人体には使用しないこと。
- アルコール製品ですから、火気に十分注意して使用すること。
- ストープやコンロ等、火気の付近で使用しないこと。
- 狭い場所や長時間使用する場合は、窓や扉を開けるなど必ず換気を十分に
 行うこと。

応急処置

- 万一目に入った場合は、こすらずに流水で十分に洗い流すこと。
- 使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに通気のよい場所で安静にすること。
- 異常が残ったり、回復しない場合は医師の診察を受けること。
- 皮膚に付いた場合は石鹸等でよく洗うこと。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17 (ISO13485 認証工場)

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



JQA-MD0058
 横浜工場

歯科用吸引装置、
 歯科用吸引装置ポンプ、
 電動式吸引器及び
 歯面漂白加熱装置の
 設計・開発及び製造

2206020002P