


フリーアーム用アタッチメント

フリーアームシールド

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

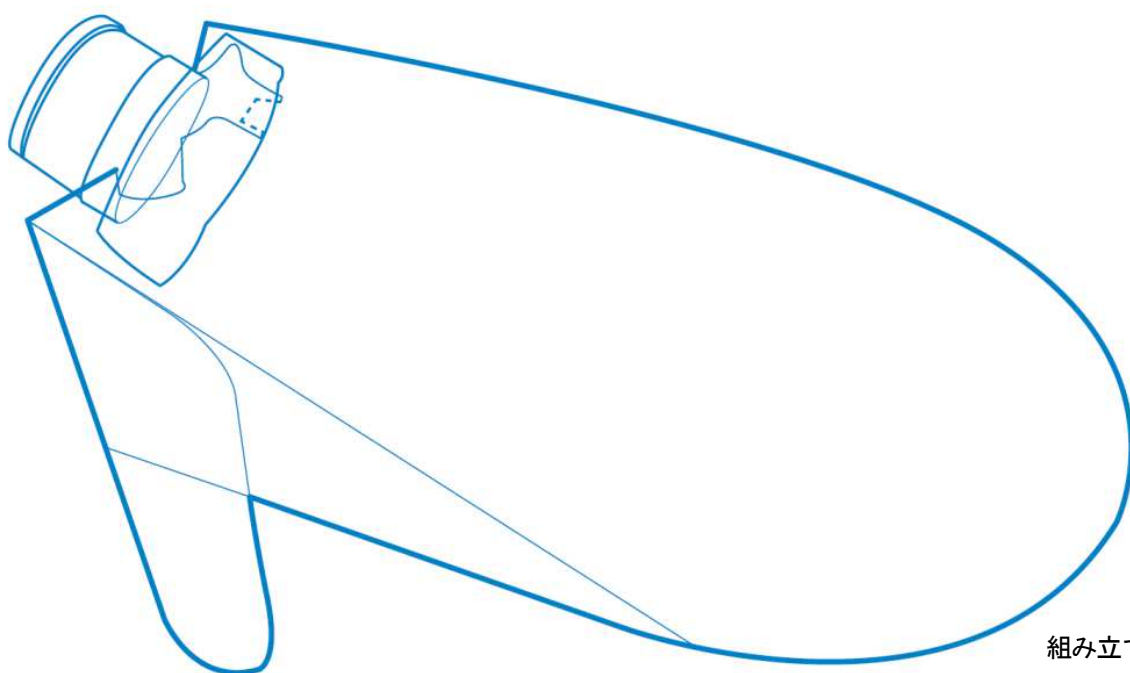

組み立て方法の
動画はこちらから



このたびは、『フリーアームシールド』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、本取扱説明書の ⚠ 警告、⚠ 注意をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、わからない時は再読してください。

正しく使って効率アップ

 株式会社 **東京技研**

概要

本製品は、当社製品フリーアーム・アルテオおよびフリーアーム・フォルテに装着する専用防護シールドです。エアゾルを吸引するとともに、治療者への飛散を物理的に防護します。



本製品は以下の対象製品との組み合わせでのみ使用可能です。

- フリーアーム・アルテオとNフードの組み合わせ
- フリーアーム・フォルテとPCフードの組み合わせ



安全上のご注意

本書では本製品をお使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため必ずお守りいただく内容を次のように説明しています。



- 安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように区分して説明しています。

 警告	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると「使用者が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。



- お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。

	してはいけない禁止事項を示しています。
	必ず実行していただく強制・指示事項を示しています。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">・本取扱説明書に記載している対象製品及び指定の組み合わせ以外で使用しないこと。・本製品を治療の目的以外に使用しないこと。・本製品の改造を行わないこと。
 指示	<ul style="list-style-type: none">・本製品は使い捨てのため、1人の患者ごとに製品の交換を行うこと。・使用後は廃棄をすること。廃棄に関しては、本ページ「廃棄について(環境保護)」を参照すること。

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">・大きな衝撃を加えないこと。・不具合状態及び未整備状態で使用しないこと。・高温機器を近づけたり、近くで使用しないこと。
 指示	<ul style="list-style-type: none">・製品端面のエッジで手や顔を切らないように気を付けて扱うこと。・異常時には直ちに使用を中止すること。

廃棄について(環境保護)

使用後の本製品には、血液や病原微生物等が付着している恐れがあります。したがって、本製品を廃棄する場合は、環境への影響を抑制するために、感染性廃棄物として滅菌消毒を行った上で、特別管理産業廃棄物の取得許可を取得している業者に処理委託を行うか、購入先又は当社までご連絡ください。


輸送及び保管に関する環境条件について

輸送及び保管に関しては下記の内容に注意してください。


- ①傾斜、振動、衝撃などのないように輸送及び保管を行うこと。
- ②水がかからないように輸送及び保管を行うこと。
- ③気圧、風通し、日光、埃、塩分・硫黄分を含んだ空気などによる悪影響のない場所に輸送及び保管を行うこと。
- ④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
- ⑤周囲温度範囲-10℃から40℃、相対湿度20%から90%(非結露)の範囲で輸送及び保管すること。
- ⑥梱包状態では大きい平面を上にして輸送及び保管すること。(梱包箱を参照のこと。)

使用方法


本取扱説明書の表紙の QR コードから組み立て方法の動画をご覧になれます。

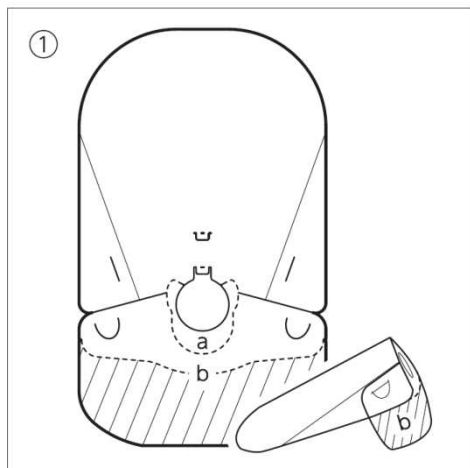


①
[フリーアーム・アルテオ]
a 点線部分を切り取ります。
b ミシン目線部分より下斜線部が不要な場合は切り取ります。
[フリーアーム・フォルテ]
b ミシン目線部分より下斜線部が不要な場合は切り取ります。

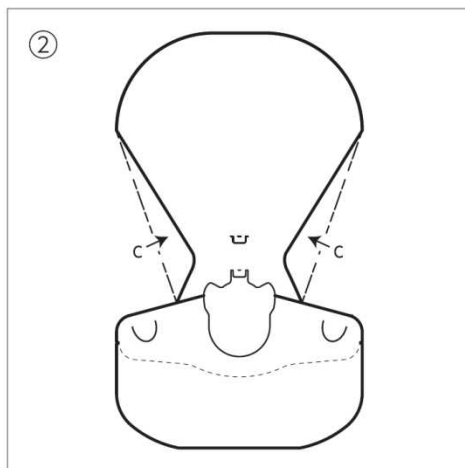


② c 折れ線部分を折り曲げます。

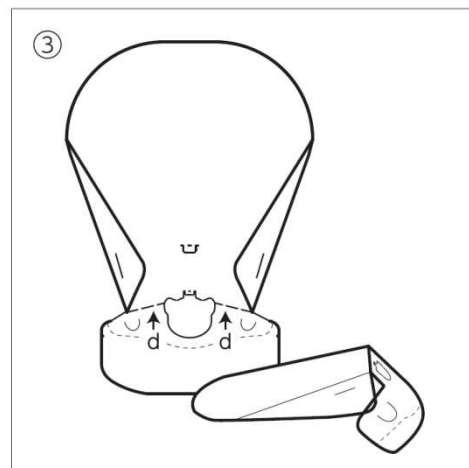


③ d 折れ線部分を折り曲げます。

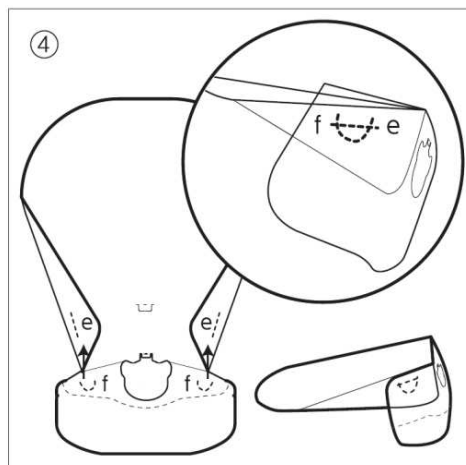

④ e の切り込み部分に f の切り込み部分を差し込みます。

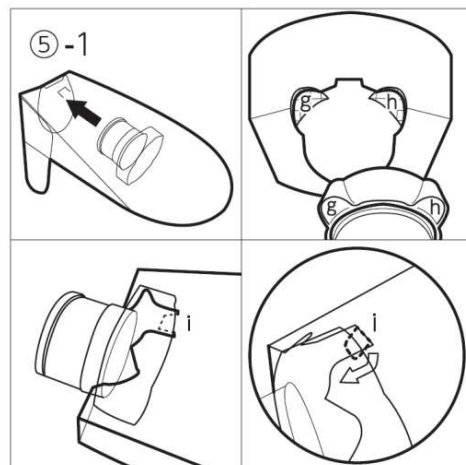

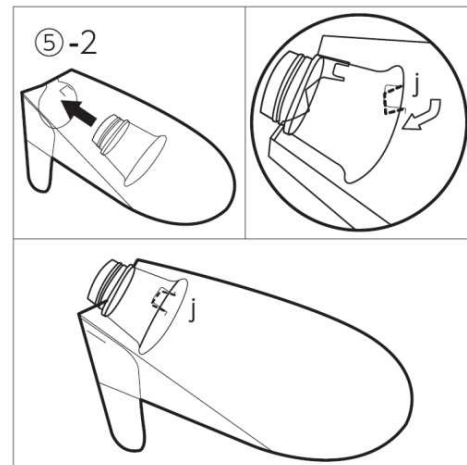

⑤-1 [フリーアーム・アルテオ]
シールドの取り付け穴 g h と N フードの g h の部分を合わせて N フードを差し込み、i 点線部分をフードの内側に引っ掛けます。その後アームに取り付けて使用できます。





⑤-2 [フリーアーム・フォルテ]
シールドの穴に PC フードを差し込み、j 点線部をフードの内側に引っ掛けます。その後アームに取り付けて使用できます。

警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品を持ってアーム操作をしないこと。変形、破損、落下の可能性があります。
 指示	<ul style="list-style-type: none"> ・アーム操作時に本製品が患者や物に衝突することがないようにすること。 ・アーム操作時は患者にフェイスタオルをかけるなど適切な処置を行うこと。 ・本製品の取り付けは確実にを行い、フードがしっかりとロックされていることを確認すること。

注意


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は高温での滅菌はできません。(本製品は使い捨てです。)
 指示	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品の着脱の際は、当社製品フリーアームの吸引を OFF にしてから行うこと。また、感染防止のため手指を防護するグローブ等を着用すること。

外観寸法(組み立て前) W×D	290 mm × 490 mm
外観寸法(組み立て後) W×D×H	290 mm × 320 mm × 96(or180) mm
シールド厚さ	0.3 mm
質量	約 50 g
材質	PET
内容量	10 枚入り

〈組み立て前〉

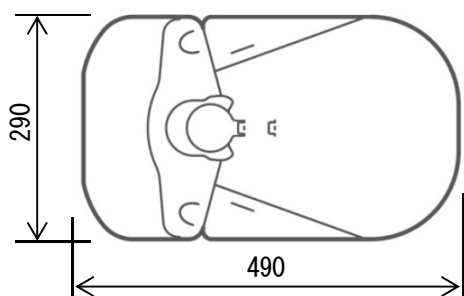

〈組み立て後〉

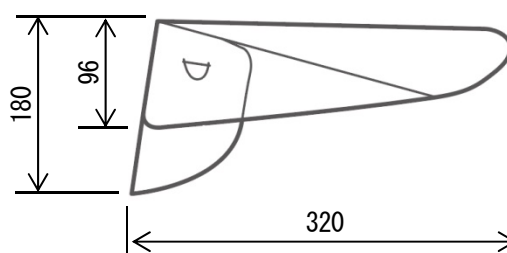

単位:mm

測定値は、当社規定方法によるもので保証値ではございません。
仕様は予告なく変更する場合がございます。取り付け時にご確認ください。

歯科用セントラルサクシオンシステムの専門メーカー

 株式会社 **東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> E-mail: TG@tokyogiken.com

本 社: 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13
TEL: 03-3703-5581(代) FAX: 03-3705-1760

仙 台営業所: 〒981-3112 仙台市泉区八乙女4-10-4
TEL: 022-371-9651 FAX: 022-371-9653

名古屋営業所: 〒465-0007 名古屋市名東区香坂1001
TEL: 052-776-3355 FAX: 052-776-3356

大 阪営業所: 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-6-19
TEL: 06-6368-8877 FAX: 06-6368-8876

福 岡営業所: 〒812-0015 福岡市博多区山王1-15-7
TEL: 092-411-0377 FAX: 092-411-0376

横 浜 工 場: 〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

TGYA1-01V-15001E
TGD000002-00-02