

リターンボックスプラス (200V/100V) 取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください。




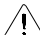
このたびは、『リターンボックスプラス(200V/100V)』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書の⚠警告・⚠注意をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、わからない時は再読してください。



正しく使って効率アップ

警告表示の説明





本書では安全に関わる注意事項を、その危険の大きさの程度によって、次のように分類して記載しています。

 警告	この表示は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害が想定される内容」を示しています。

図記号の説明

行為を禁止する記号	行為を指示する記号
	

注意事項

 警告	 指示	・必ずブレーカを切ってから作業をしてください。
 注意	 禁止	・診療用サクシヨンのリターン配管以外には使用しないでください。 ・製品の改造はしないでください。 ・ドライバーおよび工具を使用する際の「分解」はしないでください。 ・大きな衝撃は加えないでください。

下記の原因により生じた故障・損傷につきましては、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。

- ① 当社または当社の指定した業者以外による改造・保守及び修理。
- ② 当社が納入した製品以外の他社製品が原因で、当社の製品が受けた故障・損傷。
- ③ 当社指定の純正部品以外の補修部品の使用による改造・保守・修理。
- ④ この取扱説明書に記載されている注意事項や操作方法を守らなかった場合。
- ⑤ この取扱説明書に記載されている電源・設置環境など、本製品の使用条件を逸脱した周囲条件による場合。
- ⑥ 火災・天災(地震・水害・落雷等)の場合。

本製品を設置するときには、次の事項に注意する事。

- ① 水のかからない場所に設置する事。
- ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分・硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所に設置する事。
- ③ 傾斜、振動、衝撃(運送時を含む)などない様、安全状態に注意する事。
- ④ 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に設置しない事。
- ⑤ 電源及び消費電力に注意する事。

概要


本製品は、診療用サクシオン使用終了と同時に一定時間作動し、配管内に多量の空気を流すことで配管内の残留水を搬送させるための装置です。

仕様

	リターンボックスプラス(200V)	リターンボックスプラス(100V)
電 源	単相 AC 200V	単相 AC 100V
消費電力	2.2W/1.8W (50Hz/60Hz)	
寸 法	W112×D104×H145mm	
質 量	約 0.9kg	
接続口径	VP30	


※記載された数値は保証値ではありません。

各部名称

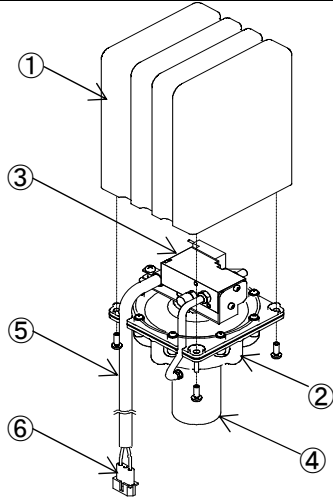


番号	名称	備考
①	カバー	材質：PP
②	本体	材質：PP
③	電磁弁	単相 AC 200V/100V
④	接続部	VP30
⑤	電源コード	0.75sq×2 芯
⑥	コネクタ	200V：3P / 100V：2P

取付方法

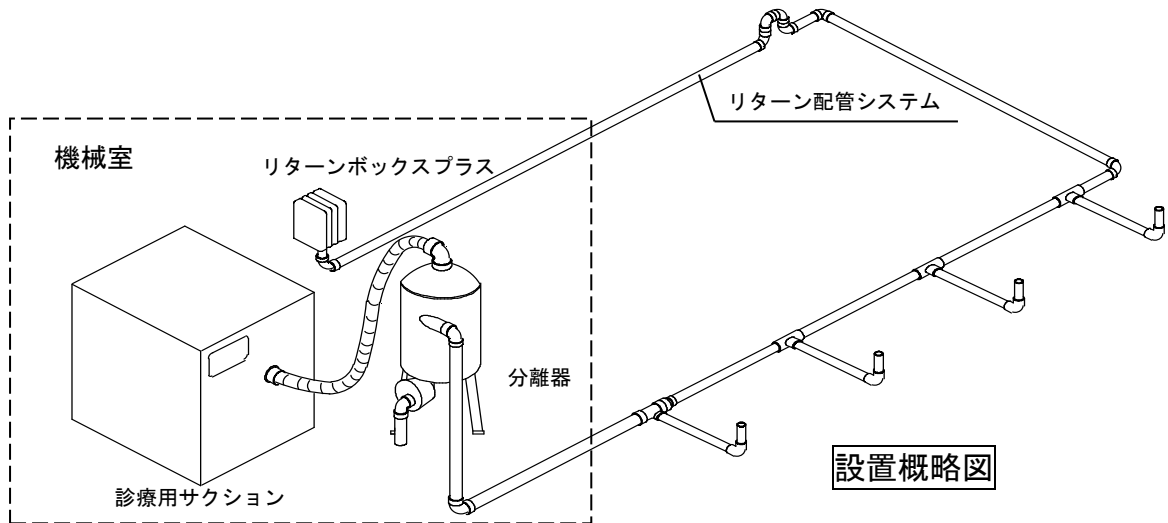

- ① 機械室内のリターン配管の接続口（VP30）にソケットを接続し、本製品を接続します。
※ソケットは付属していません。

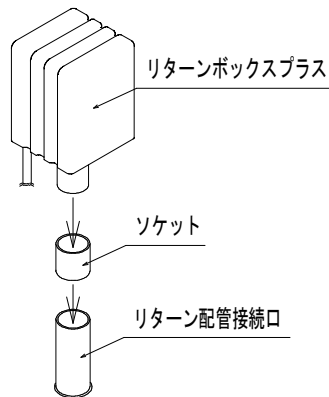

- ② ブレーカを切り、各装置の電源が切れていることを確認した後、本製品のコネクタを、対応するコネクタに接続します。
 リターンボックスプラス（200V）は、200Vのコネクタへ接続する。
 リターンボックスプラス（100V）は、100Vのコネクタへ接続する。

⚠ 警告



指示

・必ずブレーカを切ってから作業をしてください。

⚠ 注意



指示

・本製品の仕様を確認して、適切な電源に接続してください。
 ・取扱説明書をよく読み正しく使用してください。



禁止

・大きな衝撃は加えないでください。

- 保証書は記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は1年間です。
- 保証期間中の修理は保証書の記載内容により無償修理いたします。
- 保証期間経過後の修理は、購入先または当社までご相談ください。

保証書

本証書は、本証書に記載された製造番号（シリアル番号又はロット番号）の商品が、当社に於いて入念に製作し厳密な検査を完了して出荷されたものであることを証明し、かつ納入後1年以内に万が一発生した自然故障に対し、当社が無償修理の責任を負うことを保証するものです。

製品名 製造番号 (シリアル番号 又は ロット番号)	当社指定の製造番号が入ったシールを 貼付していないものは無効です
※ご住所	〒 TEL ()
※ご芳名	様
※納入日	年 月 日
保証期間	納入日より1年間
※販売店名	

※ご住所・ご芳名・納入日・販売店名の欄に記載がない場合は無効になります。

保証内容

- (1) 「正常な使用状態」において「製造上の責任」による故障について保証適用します。
- (2) 次の場合は保証期間中でも「有償修理」となります。
(イ)取扱説明書及び添付文書等に記載された注意事項・使用環境・使用方法
・日常点検及び保守点検等を遵守しなかったことによる故障
(ロ)火災、地震等天災又は異常電圧等による故障
(ハ)保証書の所定事項の未記入、押印もれ、又は文字を勝手に訂正された場合等
(ニ)製品に付属している消耗品等
- (3) 保証期間経過後又は保証適用外の故障につきましても、誠意をもって修理いたします（実費修理となります）

歯科用セントラルサクシオンシステムの専門メーカー

 株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> E-mail: TG@tokyogiken.com

本社：〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13
TEL：03-3703-5581(代) FAX：03-3705-1760

大阪支店：〒564-0051 大阪府吹田市豊津町59-5
TEL：06-6368-8877 FAX：06-6368-8876

仙台営業所：〒981-3112 仙台市泉区八乙女4-10-4
TEL：022-371-9651 FAX：022-371-9653

名古屋営業所：〒465-0007 名古屋市中東区香坂1001
TEL：052-776-3355 FAX：052-776-3356

福岡営業所：〒812-0015 福岡市博多区山王1-15-7
TEL：092-411-0377 FAX：092-411-0376

横浜工場：〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

TGYA1-01V-15001F
VP100-01-K015C