



日々の診療に寄り添う
オフィスホワイトニング



東京技研がかたちにした、
医院のためのオフィスホワイトニングライト

BRILICA
ブリリカ ビアンコ **bianco**

日々の診療を支える オフィスホワイトニングライトです。

ブリリカ ビアンコは、コンパクトな設計と幅広い薬剤への対応力により、
オフィスホワイトニングのスムーズな導入をサポートします。

軽量設計
約 **100** g

ほぼ
原寸大

85 mm

141 mm

照射の特長

均一でムラのない光。
幅広い波長で、
薬剤を選ばず対応します。


特殊な拡散板

光を絞り均一にすることで、患者様の
眩しさを抑え、ムラのない効果的な照射
を実現します。

出力
100
mW/cm²

幅広い発光波長域

400~480nm という幅広い波長で、さまざまな
オフィスホワイトニング材に適用します。


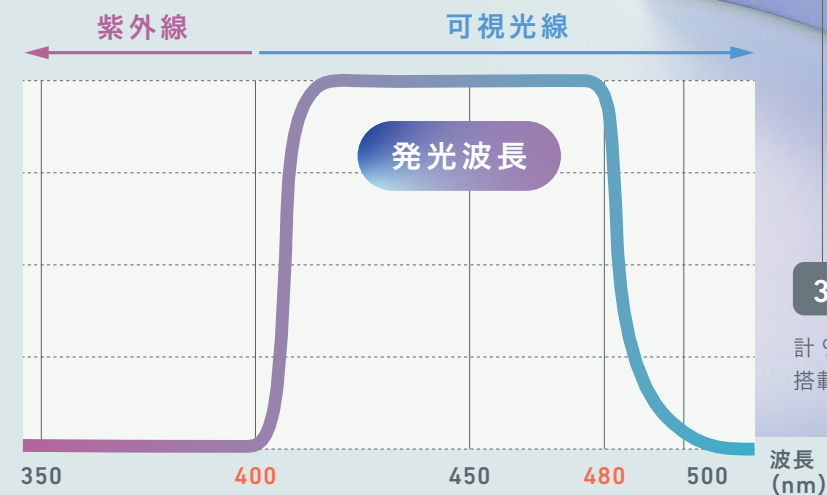


3種類のLEDライト

計 90 灯の LED ライトを
搭載しています。

使用方法

開口器への取り付けは
簡単＆スピーディー

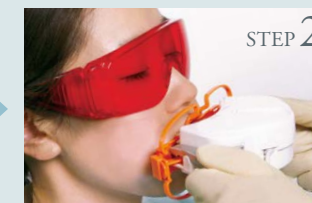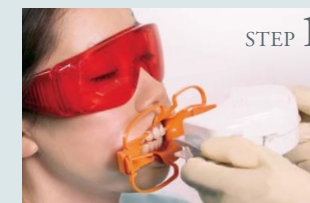

MOVIE

詳しい説明・
施術風景の
動画はこちらから

※効果や使用感には個人差があります。

ブリリカ ビアンコが
選ばれる、
4つの理由。

1

導入しやすい。

薬剤を選ばない・軽い・小さい

わずか約 100g の軽量・コンパクト設計。チェア周りにも置きやすいサイズです。幅広い波長で、薬剤の種類を問わず使用可能。スムーズに導入・運用いただけます。



2

患者様にやさしい。

動けないストレスを軽減

開口器に直接装着する設計だから、照射位置がズレにくく、患者様の「動いてはいけない」というストレスを軽減します。

3

術者にやさしい。

お知らせ機能付き

リチウムイオンバッテリー搭載で、取り回しもスムーズ。さらに、照射終了や緊急停止を音とブザーで知らせる機能付きで、施術中も安心して使いいただけます。

4

リスクに配慮。

均一照射

100mW/cm² の LED と拡散板の採用により、照射ムラの軽減を目指した設計です。さらに、あえて出力を抑えることで、歯髄に対する為害性を抑制するよう配慮しています。

ブリリカ ピアンコ パッケージ内容



■ 本体



■ コントローラ

リチウムイオンバッテリー搭載によりコードレス化



■ お知らせ受信機

緊急停止時と終了時に振動と音でお知らせ



■ ブリリカ用開口器 S (1 個)

■ ブリリカ用開口器 SS (1 個)

口角鉤 ダブルワイダー
11B1X1000650D205



■ ピアンコ
AC アダプタ



■ 保護めがね



■ 収納袋



■ 院内掲示用
パネル



■ 患者様用
リーフレット
(50 部)



■ 口唇・口腔シート化粧品
リップリー
(1 箱 10 枚入)



CATALOG
リップリーのカタログ・
使用方法の動画は
こちらから

製品仕様

電源	リチウムイオンバッテリー	連続使用可能時間 (満充電時)	約 90 分	医療機器届出番号	14B2X00036000008 (一般医療機器・特定保守管理医療機器)
充電器定格 50/60Hz	AC100V 0.3A	充電時間	約 180 分	一般的名称	歯面漂白用加熱装置
光源LED	φ3 LED×90 個	タイマー設定時間	0.5~20 分	販売名	ブリリカ ピアンコ
寸法/質量 (本体)	W141×D85×H43 / 約 100g	発光波長域	400~480nm	*左記は温度20℃の場合の測定値です *寸法の単位はmmです *仕様は予告なく変更する場合がございます	
(コントローラ)	W68×D128×H50 / 約 230g	照射エリア	W70×H25		
(お知らせ受信機)	W61×D103.5×H18.5 / 約 90g	製品コード/JAN	A254 / 04560200854149		

導入の不安も、運用の疑問も、 トータルにサポート



Total support

面倒な準備も、複雑な操作も必要ありません。

日々の診療にスムーズに組み込める設計で、衛生士の方でも問題なく運用可能です。

導入前のデモ体験から、導入後のサポートまで万全の体制をご用意しています。

まずはお気軽に、お問い合わせください。

■ お問い合わせ

tel: 03-3703-5581

e-mail: TG@tokyogiken.com

株式会社 東京技研

e-mail: TG@tokyogiken.com



<https://www.tokyogiken.com>

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤1-25-13
【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5
【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4
【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001
【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王1-15-7
【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37
(ISO13485 認証工場)

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



JQA-MD0058
横浜工場

歯科用吸引装置、歯科用吸引装置ポンプ、
電動式吸引器及び歯面漂白加熱装置の
設計・開発及び製造

