

# サクション操作盤 バックアップ切り替え方法

メインサクションが動かない！  
そんなときは、ひとまずバックアップサクションに切り替えましょう。



メインサクション



バックアップサクション



A180 : サクション操作盤 /0.75kW

予備 予備

操作線 通常 操作線 通常

一番右のスイッチを、『通常』から『予備』へ切り替えましょう！



A181 : サクション操作盤 /1.5kW

**注意**

バックアップサクションは緊急用の製品のため、長時間の使用に耐えるよう設計をされておられません。  
お早めに東京技研にご連絡をいただき、メインサクションの修理手配をいただきますようお願いいたします。



JQA-MD0058  
横浜工場  
歯科用吸引装置、  
歯科用吸引装置ポンプ、  
電動式吸引器及び  
前面漂白加熱装置の  
設計・開発及び製造