

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 歯科用吸引装置ポンプ (JMDN コード : 70727000)

TCS-バックアップ


** 【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- 1) 有機溶剤(レジン液、アルコールなど)を吸引しないこと。
[有機溶剤により火災などを引き起こす可能性があるため。]

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造等〉

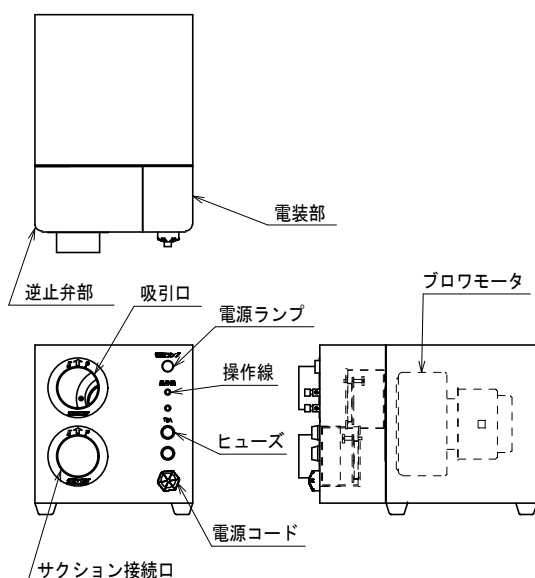

〈原理〉

モータを駆動させることにより、モータと一体になっているブロワ内部の回転翼が回転し、吸引が開始される。ブロワからの排気は、本体内に排気され、外に排気する。

** 〈動作保証条件〉

周囲温度 : 5~40℃

雨水及び直射日光を避けた機械室などに設置し、機器が稼働しても上記の条件になるように吸換気などの設備を設置すること。

【使用目的又は効果】

本品は歯科治療における高速切削時に出る粉塵の吸引除去、唾液、血液、切削時に供給される冷却水等の排液の吸引除去を目的とする機器の吸引装置が故障時の予備の吸引装置として使用される。

【使用方法等】

機器の取付・据付は専門の担当者(当社又は当社の指定する業者)が行うこと。

メインサクシジョンが異常時にサクシジョン専用操作盤又はメインサクシジョンのパネル内の切換スイッチを切換える。

** 〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 1) 吸引管路内部の清掃に用いる洗浄剤は、サクシジョンクリーナ・リンス(別売品)を使用し、特に発泡性のある洗浄剤は吸引しないこと。
- 2) 短時間でのON・OFFの繰り返し運転を行わないこと。

【使用上の注意】

** 〈重要な基本的注意〉

運転中及び停止後は、外装が熱くなっている為、注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

** 〈保管の条件〉

下記の条件にて保管すること。(但し、結露しないこと)

周囲温度 : -10℃~40℃

相対湿度 : 20~90%

〈耐用期間〉

3年間。(自己認証(当社データ)による。)

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

**** 【保守・点検に係る事項】**

〈使用者による保守点検事項〉

頻度	内容 (概要)
始業前	装置の外観・構成品に異常がないこと。
1 ヶ月ごと	定期運転 分離器の清掃

詳細は取扱説明書を参照すること。

**** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売業者〕

株式会社東京技研横浜工場

電話番号 045-591-4441

〔製造業者〕

株式会社東京技研