


FREE ARM ANTIBACTERIAL COVER.

フリーアーム用 抗菌カバー

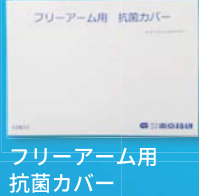


抗菌材配合のカバーを装着して、吸引させるだけ。
フリーアームをいつでも清潔に。
安心診療のためのひと工夫、始めてみませんか。

操作性の
影響なし

センサースイッチの
影響なし

ウイルス除去・除菌

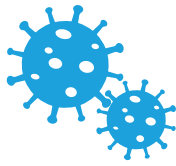

ウイルス
virus



菌
bacteria

品質表示	
製品コード	B362
JANコード	04560200857409
原料樹脂	ポリエチレン
使用室温	0～40℃
色	半透明
寸法	外形 300×2200(mm)
厚さ	0.012(mm)
枚数	1箱 50枚入り

フリーアーム用抗菌カバーの役割

歯科医院には様々な感染リスクが存在します。治療時に発生する飛沫・粉塵により、ドクターやスタッフ、患者さまが汚染される可能性は決して低くありません。フリーアームは口腔外に漏れる有害な浮遊粉塵を発生源から捕集する機器ですが、フリーアーム本体に汚染物質が付着してしまう可能性も少なくありません。フリーアーム用抗菌カバーは、抗菌材配合の使い捨てカバー。フリーアームをいつでも清潔に保つことができます。

関連製品




- **パワーミスト2**
フリーアーム専用の除菌スプレー。
B087 / 04560200857300
容量: 160ml
- **アルテオ 掃除用キット**
パワーミスト2、スポンジブラシのセット。
B459 / 04560200857911

ご使用方法

フリーアーム・アルテオの場合

※床固定型、天井設置型、単体移動型を問わず、「フリーアーム・アルテオ」、「フリーアームフォルテ」の全てのタイプにお使いいただけます。

取付け方法

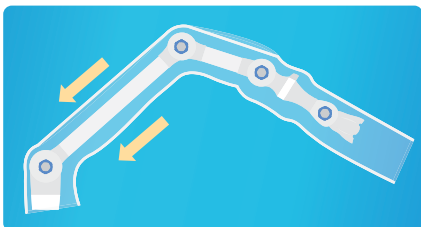

フードとサイレントフィルタを外して抗菌カバーを第一関節まで入れます。



センサースイッチに手をかざし、抗菌カバーをアームの中に吸い込ませます。

取外し方法



フード、サイレントフィルタを取外し、汚れた部分の中に入れてながら抜き取ります。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市泉区八乙女 4-10-4
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市名東区香坂1001
 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-6-19 イグポート5
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市博多区山王 1-15-7
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-37
 【物流センター】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-43-17

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
 (ISO9001 ISO13485 認証工場)



JGA-QMA14805
JGA-MQ005B
株式会社

歯科用吸引装置、歯科用吸引装置ポンプ、電動式吸引器及び歯面漂白加熱装置の設計・開発及び製造

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。

2011040002P