



IONY

オートクレーブ用 脱塩水生成器 [アイオニー]

ご存知
ですか?!

オートクレーブで 水道水を使用していることのリスク!

蒸発残留物が原因で故障にもつながり、
治療器具等に悪影響を及ぼします。

＼ オートクレーブに必要な精製水はアイオニーで解決 /

蛇口をひねるだけ! 水道水がいつでも オートクレーブ用に!

point

精製水を購入・買い置き、、、
その必要がなくなります。

コストとストックの
負担を軽減!

ソーラーパネルの
搭載で電源が
不要です。

持ち運び
取付けが
カンタン!



株式会社 **東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

IONY

オートクレーブ用 脱塩水生成器 [アイオニー]

アイオニーの使い方はとてもカンタン



アイオニー本体


オートクレーブ

蛇口と付属のホースを接続。本体から出る生成された水をオートクレーブでご使用ください。

point

ソーラーパネルの搭載で電源が不要! 蛍光灯でもOK!

AC電源を使用しない
水まわりなので安心!

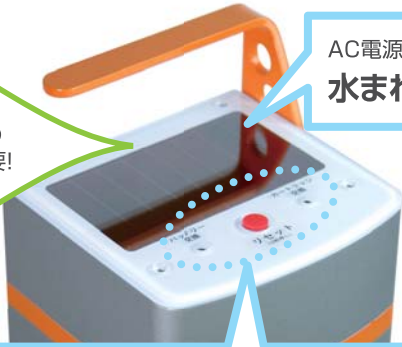

カートリッジとバッテリーの交換時期を **確認** できます!

カンタンに着脱が可能な機構を採用していますので
**カートリッジの交換が
とてもカンタン!**



独自のセンサーで水質管理。
LEDとブザーで
**カートリッジの
交換時期をお知らせ。**




<別売り>
アイオニー カートリッジ
B375/04562199989239

point

精製水の買い置きが不要です!
カートリッジはコンパクトなので
ストックにも便利。

常時の設置以外にも
都度の使用時に便利な設計!

小型&スリム構造なので
片付けがラクラク!

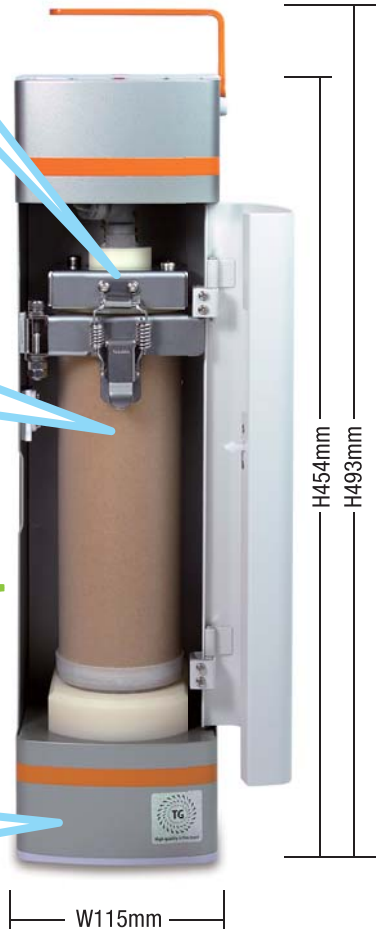

設置、使用上のご注意

- ※ 生成された水は、飲用水としてご利用にならないでください。
- ※ ホースは折り曲げたり、つぶしたりして水の流れが悪くならない様にご使用ください。
- ※ 30℃以上の水は通さないでください。
- ※ 火気の近くには設置はしないでください。
- ※ ホース収納時は、ホースの中の水分を除去した後に収納してください。
- ※ カートリッジ交換のランプが点灯してからのご使用は避けてください。(オートクレーブの故障の原因になります。)

寸法	W115xD110xH454mm (本体部のみ)
質量	約3.7kg (使用時は約4.0kg)
流量	1 L/min以下 (使用水道水圧による)
供給水温度	5~30℃
製品コード/JAN	A255/04562199988430

<標準セット内容>

本体
アイオニーカートリッジ
ホース(IN用)
ホース(OUT用) ※本体装着済み
蛇口用アタッチメント



株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445 (ISO13485 認証工場)
 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



ISO 13485

JGA-MD0058
横浜工場

歯科用吸引装置、
歯科用吸引装置ポンプ、
電動式吸引器及び
歯面漂白加熱装置の
設計・開発及び製造