


東京技研のフリーアームをご愛顧いただいている皆様へ

フリーアームの消耗品、 きちんと交換していますか？

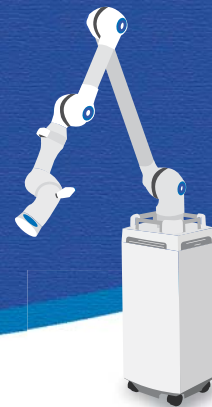

サイレントフィルタ抗菌プラス

NEW

サイレントフィルタ 抗菌プラス

アームの先端に差し込むだけで、吸引音の静音性がアップ。さらに、素材に銅イオンを配合したことでウイルス等の抑制効果をプラスしました。

B511/ サイレントフィルタ抗菌プラス



Nフード

Lフード

Nフード/Lフード

口腔外サクションの必需品“フード”。どのくらいの頻度で交換していますか？新しいフードと汚れたフードでは、かなり印象が変わります。

B457/ アルテオ N フード

B458/ アルテオ L フード

清掃方法・メンテナンス等でお困りでしたら…

弊社の Youtube チャンネルにてマニュアル動画を公開中です！





汚れたフード



綺麗なフード



スポンジ

パワーミスト2

掃除用キット

フリーアーム掃除用キット

お掃除には「掃除用キット」。診療後、パワーミスト2を吸引させるだけで除菌・洗浄ができます。内部の目立つ汚れには、スポンジで軽く拭き取ると効果UP！

B087/ パワーミスト2(バラ)

B381/ フリーアーム専用スポンジ

B731/ フリーアーム掃除用キット



2秒で洗浄！



内部はスポンジで



塵受けフィルタ

バッグフィルタ

SBF

アルテオ-S専用フィルタ

「塵受けフィルタ」、「バッグフィルタ」、「SBF(スーパーバイオフィルタ)」は定期的に変換することで吸引力低下を防ぎます。

B029/ フリーアーム S 用塵受けフィルタ

B030/ フリーアーム S 用バッグフィルタ

B031/ 交換用 SBF- フリーアーム S/2.2MAX

フィルタ交換時期のめやす

塵受けフィルタ：1ヶ月

バッグフィルタ：6ヶ月

SBF：3年



■フリーアーム・アルテオ-S
医療機器認証番号：224AH8ZX00034000号(管理医療機器)
一般的名称：歯科用吸引装置/販売名：フリーアーム・アルテオ-S