

クリーンエリアプラス フードオプション

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください



このたびは『クリーンエリアプラス』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書およびクリーンエリアプラスの取扱説明書の
⚠ 警告、**⚠ 注意**をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- この取扱説明書は、いつでも使用できるように大切に保管し、わからない時は
再読してください。
- 取付要領書は右の「取付要領書」QRコードよりご参照ください。




取付要領書

正しく使って効率アップ

 株式会社**東京技研**

各部名称

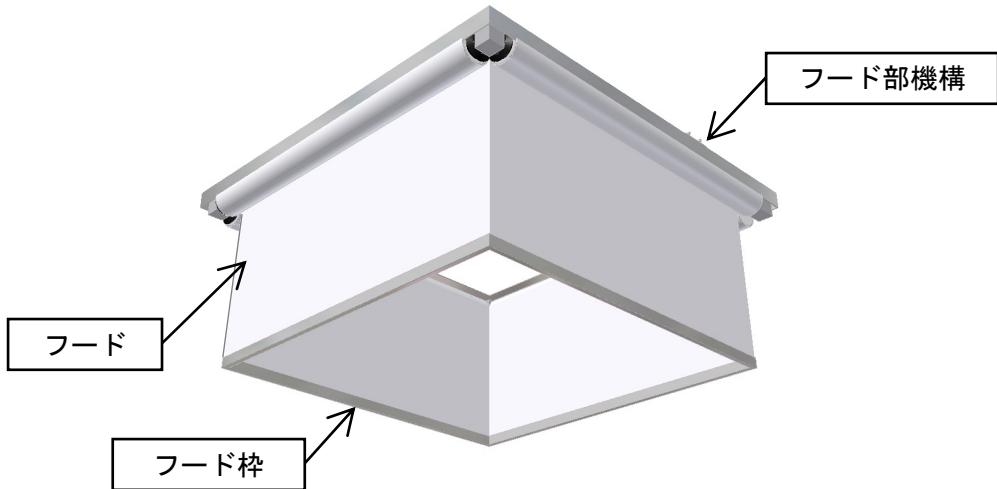

使用方法

電源ONでフードは自動的に降りてきます。
電源OFFで自動的に収納します。

⚠ 注意

フードおよびフード枠にフリーアームやマイクロスコープ、無影灯等などが触れている状態で、
フードを上下に可動させると、フードがたるんだままフード部機構に巻き取られ、動作不良の
原因となります。

フードを可動させる際は、フードおよびフード枠に障害物がないことを確認してください。

仕様

フード長	300mm標準(±50mm可変)
下降時間	4秒以内
上昇時間	4秒以内
材質	無塵布
色	クリーム色