


ザ・マウス取り扱い説明書

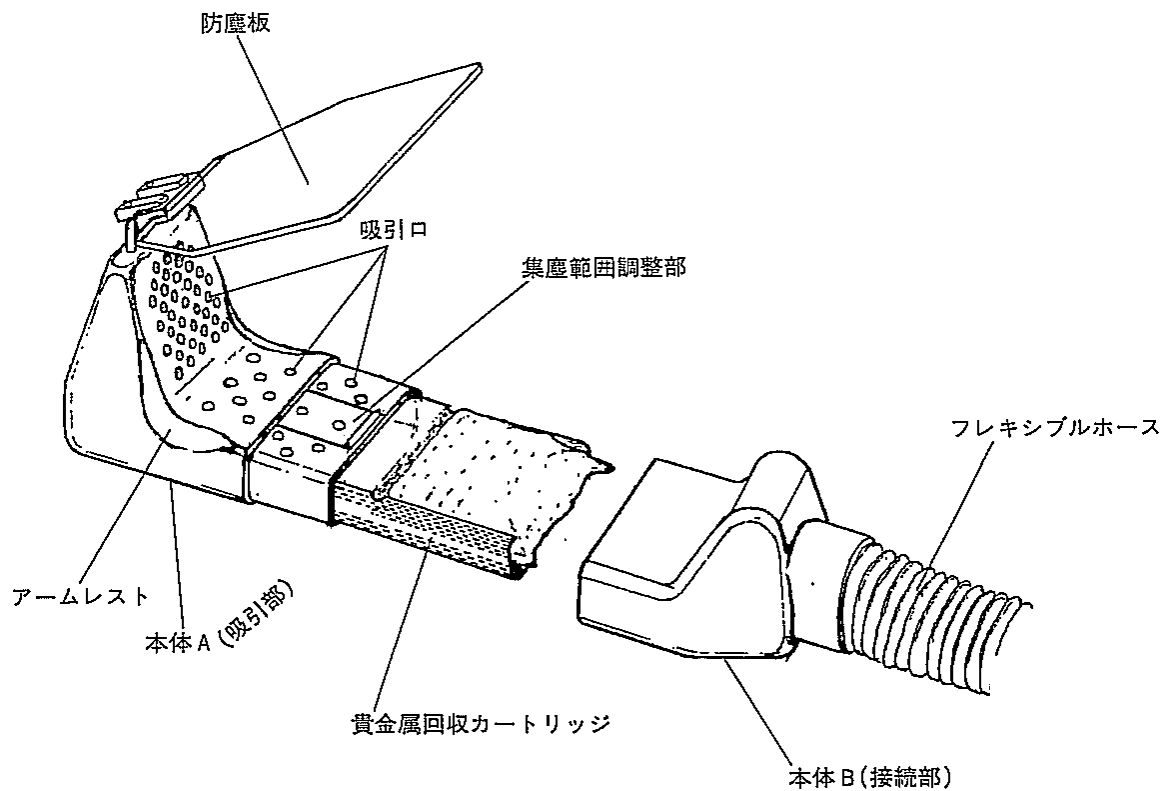

〔マウスの使用方法〕

1. 金属以外の物を切削する時は、貴金属回収カートリッジを入れずにそのまま本体 A、B を組み合わせて御使用下さい。
2. 金属を回収したい時のみ、貴金属回収カートリッジを入れて御使用下さい。
3. マウスの長さは調整出来ますので、石膏模型等の大きい物を削る時やレジン等の下に落ちる物を削る時は広げて御使用下さい。

〔防塵板の使用方法〕

1. 防塵板は、上下左右に調整出来ますので使い易い位置で御使用下さい。
2. 照明器具などの写り込みが有る時は、上下に回転させて一番見やすい位置で作業出来ます。

〔貴金属回収カートリッジの使用方法〕

1. 貴金属回収カートリッジの前方が本体 A (吸引部) の方向になるように貴金属回収カートリッジを本体 A、本体 B の中に入れて組み合わせます。
2. 金属回収以外の時 (石膏、レジン等の切削時) は、貴金属回収カートリッジを取り出し御使用下さい。

貴重な資源を上手にお使いいただくために…!

貴金属回収カートリッジ

〔カートリッジの組み立て方〕


- (1) 下図の様にミシン目の箇所を充分に折り曲げて、マウスに馴染ませる様に数回出し入れし、頭部の先端が、マウスの頂点に達した後、一度引き抜いてから剥離紙をはがし、目印(半円の切欠)位置にフィルターを設置(充分に押押し)して下さい。

フィルターの作り方: 下図の様にフィルターBを5mm位出しておいて、袋フィルターBの中に入れるとフィルターが出来上がります。

- (2) 以上の準備が出来ましたら、再度上述の要領でマウスに挿入して下さい。

注1) 金属の回収目的以外には御使用にならないで下さい。

注2) マウス及び防塵板はシンナー、ベンジン等で拭かないで下さい。

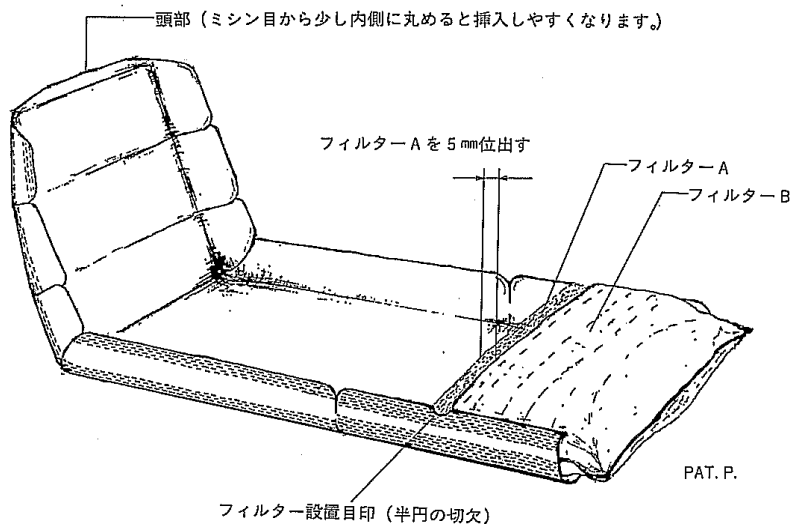

歯科用セントラル・サクション・システムの専門メーカー

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> E-mail: TG@tokyogiken.com

本社: 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13
TEL: 03-3703-5581(代) FAX: 03-3705-1760
仙台営業所: 〒981-3112 仙台市泉区八乙女4-10-4
TEL: 022-371-9651 FAX: 022-371-9653
名古屋営業所: 〒465-0007 名古屋市名東区香坂1001
TEL: 052-776-3355 FAX: 052-776-3356
大阪営業所: 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-6-19
TEL: 06-6368-8877 FAX: 06-6368-8876
福岡営業所: 〒812-0015 福岡市博多区山王1-15-7
TEL: 092-411-0377 FAX: 092-411-0376

横浜工場: 〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37
ISO9001 ISO13485 認証工場



※仕様は予告なく変更する場合がございます。

TGYA1-01V-15001C
VLP47-01-K008